

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
Средство гемостатическое Гемоблок®

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гемоблок® - 1% водный раствор неполной серебряной соли полиакриловой кислоты, с интегрированными наночастицами серебра.

Гемоблок® - жидкое гемостатическое средство в виде полимерного раствора по вязкости близкое к воде. Цвет раствора от бесцветного до желто-коричневого, возможно наличие взвеси, pH нейтральный. Хирургическое инвазивное медицинское изделие кратковременного применения.

Гемоблок® - действие местное, Гемоблок® не проникает в системный кровоток. При взаимодействии с белками плазмы крови (главным образом с альбумином) Гемоблок® формирует полимерный комплекс (полиакриловая матричная структура, связанная с молекулами альбумина). Такая структура упаковывается в несколько микрослоёв, создавая прочную полиметакрилатную плёнку на поверхности раны. В дальнейшем поверхностная структура Гемоблок® -белок замещается фибрином. При образовании полимерного комплекса наступает гемостаз. Полиметакрилатная пленка не видима невооруженным глазом, биодеградирует естественным путем в течение суток.

Гемоблок®, за счёт наличия в составе наночастиц серебра, обладает бактерицидным, противовирусным и противогрибковым действием. Бактерицидный эффект проявляется в отношении большинства известных грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Moraxella spp., и других, а также грибковой флоры (Candida spp., и др.) и к устойчивым внутрибольничным штаммам бактерий. Препятствует развитию раневой инфекции. Раны заживают первичным натяжением шва без нагноений.

Гемоблок® не содержит компонентов животного происхождения, не проявляет раздражающего, прижигающего, вяжущего, токсического, резорбтивного или аллергенного действия, не оказывает побочного действия на ткани. Средство не требует дополнительного оборудования при использовании. Не ухудшает визуализацию в области нанесения. Не всасывается. Не проникает в системный кровоток. Не влияет на функцию гемостаза в общем кровотоке, не приводит к тромбообразованию, повышению СОЭ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гемостатическое средство с антисептическими свойствами для местного применения.

Применяется для остановки всех типов капиллярных и паренхиматозных кровотечений, возникающих при травмах и хирургических операциях, в том числе:

- в зоне кровоточивости инфицированных и гнойных ран,
- для обработки поверхности ожоговых ран, трофических язв,
- при открытых и лапароскопических операциях в зоне вмешательства и на паренхиматозных органах,
- при кровотечениях из губчатого вещества и поверхности кости,
- для гемостаза и визуализации при эндоскопических манипуляциях,
- для гемостаза инфицированных и чистых челюстно-лицевых ран,
- для офтальмохирургии.

Используется в различных отраслях хирургии: ангиологии и кардиохирургии для уменьшения кровоточивости с поверхности протезов и анастомозов, абдоминальной хирургии, протектологии, гнойной хирургии, ортопедии и травматологии, урологии, гинекологии, пластической, эндокринной хирургии, онкологии, офтальмохирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, детской хирургии и т.д.:

1. Кровотечения из мышечной, жировой, губчатой костной, соединительной ткани, возникающие в ходе выполнения хирургических операций.
2. Кровотечения из паренхиматозных органов при хирургических операциях (капиллярные кровотечения из паренхимы печени, селезенки, почек, надпочечников, головного мозга, лёгких, щитовидной железы и др.).
3. Кровотечения из эрозивных и язвенных дефектов и злокачественных неоплазий полых органов желудочно-кишечного тракта.
4. Кровотечения из эрозивных и язвенных дефектов и злокачественных неоплазий трахеи и бронхов.
5. Кровотечения после эндоскопических операций (полипэктомии, подслизистой диссекции, мукозэктомии, радиочастотной абляции, папиллосфинктеротомии и литоэкстракции, миотомии и др.).
6. Капиллярные кровотечения из распадающихся опухолей любой локализации.
7. Капиллярные кровотечения любой локализации и этиологии при врожденном или приобретенном дефиците факторов свертывания, в том числе при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания.
8. Остановка носовых кровотечений, а также интраоперационных кровотечений в оториноларингологии (после аденотомии, тонзиллотомии или тонзилэктомии).
9. В комбустиологии: обработка ран при термических, химических и лучевых ожогах кожных покровов и слизистых оболочек.
10. В офтальмологии: при операциях на веках, конъюнктивальных сводах, склере, роговице.
11. В нейрохирургии: для остановки паренхиматозных кровотечений любой этиологии, при гемостазе лежа, удаляемых новообразований головного и спинного мозга, операций на позвоночнике.
12. В акушерстве: полостные и лапароскопические операции, кесарево сечение, эпизиотомия, разрывы маточные, разрывы влагалища и промежности, внутриматочные кровотечения, послеродовые кровотечения. В гинекологии: эндометриоз, кровотечения из шейки матки, прочие кровотечения паренхимы малого женского таза.
- 13.Оказание первой помощи при кровотечениях, обусловленных травмами, сопровождающимися ожогами, нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек.
14. Для профилактики послеоперационных осложнений (для снижения риска развития раневой инфекции и спаечного процесса), для ускорения (до полутора раз) заживления ран и ожогов кожных покровов и слизистых, послеоперационных швов, трофических язв.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Клинические данные о применении средства Гемоблок® во время беременности и в период грудного вскармливания положительные. Учитывая, что средство Гемоблок® не проникает в системный кровоток, не оказывает негативного влияния на плод, его можно применять в период беременности и период грудного вскармливания.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Гемоблок® не имеет возрастных ограничений при применении у детей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гемоблок® применяют:  
1. Наружно, внутрисосудистое введение средства Гемоблок® запрещено.  
2. Паравазально внутритканно (при язвенных кровотечениях). Не вызывает дегенеративно-некротических изменений тканей.  
Препарат стерилен, потому его целесообразно использовать с соблюдением правил асептики. Средство готово к применению.  
Для однократного применения в зависимости от интенсивности кровотечения и площади кровоточащей поверхности может быть использовано от 5 до 100 и более миллилитров Гемоблок®. а. Гемостатический эффект является дозависимым. Доза гемостатического средства не ограничена и определяется индивидуально в зависимости от площади кровоточащей поверхности и интенсивности тканевого кровотечения. Гемостатический эффект достигается в течение 1-2 минут. В критических состояниях больного (шок, ДВС-синдром, гиповолемия) экспозицию Гемоблок® а целесообразно проводить дольше: до достижения необходимого эффекта.  
При обработке раны происходит остановка кровотечения с формированием гладкой эластичной поверхности – удобного поля для проведения дальнейших манипуляций.  
При наружных кровотечениях, ранениях, ожогах, а также, в качестве средства для оказания первой медицинской помощи: возможно прямое нанесение на пораженный участок кожи или слизистый, либо смачивание тампонов (марлевых носителей) с последующим наложением на кровоточащую поверхность. Поверхность рекомендуется предварительно осушить. При необходимости дополнительно орошают наложенные на кровоточащую поверхность марлевые салфетки раствором Гемоблок® а непосредственно из флакона либо из одноразового медицинского шприца. После экспозиции (через 1-2 минуты) салфетки и тампоны осторожно удаляют с раневой поверхности. Оптимальное количество 1% раствора средства Гемоблок® - 30-50 мл для достижения надежного гемостаза, бактерицидного и/или бактериостатического эффекта. При обширных кровоточащих раневых поверхностях рекомендуется использовать 100 мл 1% раствора средства Гемоблок® .  
В т о л о с т н о й х и р у р г и и : (брюшная, плевропальная, средостенная) после выполнения основного этапа оперативного вмешательства проводится ревизия и осушение данной области тампонами, в случае диффузной кровоточивости обильно орошают раневую поверхность раствором Гемоблок® . К труднодоступным поверхностям прикладывают обильно смоченные Гемоблок® ом стерильные марлевые салфетки, их не отжимают. Полученная зона эффективного гемостаза дополнительно не осушается. Оптимальное количество 1% раствора средства Гемоблок® - 50 мл для достижения надежного гемостаза, бактерицидного и/или бактериостатического эффекта. С увеличением количества препарата эффект нарастает. С увеличением количества препарата эффект нарастает.

В т р а в м а т о л о г и и и н е й р о х и р у р г и и :  
- после выполнения основного этапа оперативного вмешательства проводится осушение зоны оперативного вмешательства тампонами, перед ушиванием ран тампоны удаляют, обильно орошают раневую поверхность раствором Гемоблок® и затем проводят послойное ушивание операционных ран без удаления избытков препарата Гемоблок® . Также возможно введение препарата Гемоблок® непосредственно в установленные дренажи после ушивания операционных ран.  
- для получения гемостатического эффекта обильно смоченные стерильные марлевые салфетки не отжимают и прикладывают к кровоточащей предварительно осушенной поверхности. Оптимальное количество 1% раствора средства Гемоблок® - 50-100 мл для достижения надежного гемостаза, бактерицидного и бактериостатического эффекта. С увеличением количества препарата эффект нарастает. Гемоблок® не является нейротоксичным, не требует смывания.

При лапаро-, артро- и торакокопических операциях, возможно омывание зоны кровоточивости 1% раствора средства Гемоблок® - 50-100 мл с экспозицией 1-2 минуты. В труднодоступные места целесообразно заведение обильно смоченной салфетки через порт. Для этого стерильную марлевую салфетку (тампон), обильно смоченную Гемоблок® ом, вводят через порт с помощью эндоскопического зажима, накладывают на кровоточащую поверхность. После экспозиции через 1-2 минуты салфетки (тампоны) осторожно удаляют.

Для остановки кровотечений из верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта и бронхального дерева сначала проводят орошение средством Гемоблок® кровоточащей поверхности через ирригационный канал эндоскопа по катетеру или спрей-катетеру до достижения необходимого эффекта визуализации зоны кровоточивости. Для инфильтрационного гемостаза (полипэктомия, язвы ДПК и пр.) применяется подслизистое введение эндоскопической инъекционной иглой в подслизистый слой вокруг кровоточащего дефекта 1-5 миллилитров Гемоблок® а.

В акушерской практике и гинекологии возможна обработка раневых поверхностей как на поверхности матки, так и внутриматочно. Используется как орошение, так и прикладывание пропитанного Гемоблок® ом тампона к источнику диффузного кровотечения.

В оториноларингологии:  
- при носовых кровотечениях: передняя тампонада полости носа марлевыми тампонами, пропитанными 1% раствором средства Гемоблок® .  
- при интраоперационных кровотечениях: прижатие марлевыми тампонами, пропитанными 1% раствором средства Гемоблок® , раневых поверхностей, при необходимости дополнительно однократное закапывание 1% раствора средства Гемоблок® в носовые ходы по 5 капель.

Гемоблок® обеспечивает устойчивый местный гемостаз за 1-2 минуты, повторные кровотечения отсутствуют. Эффективен при нарушении свертывающей системы крови (гемофилия, коагулопатия). Гемоблок® может применяться без ограничений у пациентов с нарушениями функции почек и/или печени. Гемоблок® не инфицируется, не является нейротоксичным, не требует смывания.

Показания к применению  
Паренхиматозные и капиллярные кровотечения: хирургические операции, в том числе на паренхиматозных органах, травмы, и послеоперационных процедурах (перевязках, а также раны и ожоги кожных покровов, слизистых, порезов и швов)

Противопоказания  
Не сочетать с аминокaproновой кислотой.  
Внутрисосудистое введение Гемоблок® запрещено.  
Ограничение к применению!  
Артериальные кровотечения, кровотечения из магистральных венозных сосудов.  
Индивидуальная непереносимость

Возможные побочные явления  
Не установлены.  
Случаев передозировки при применении средства Гемоблок® не установлено.

Форма выпуска  
I.Средство гемостатическое «Гемоблок®» в наборе:  
•Раствор 1 % во флаконе: по 15 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл или 100 мл. Стерильно.  
•Марлевые салфетки - 1 упаковка  
II. Средство гемостатическое «Гемоблок®» в наборе с насадкой-распылителем:  
• Раствор 1% во флаконе: по 15 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл или 100 мл. Стерильно.  
• Насадка-распылитель - 1 шт.  
  
III. Средство гемостатическое «Гемоблок®» в отдельных упаковках:  
• Раствор 1 % во флаконе: по 15 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл или 100 мл. Стерильно.

Условия хранения  
Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.  
Перевозить средство следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.  
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения I по ГОСТ 15150 при температуре от +5 до +25°С.  
Средство в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика в условиях хранения I по ГОСТ 15150 при температуре от +5 до +25°С в сухих проветриваемых помещениях. Беречь от света.

Срок хранения  
Срок годности – 3 года с даты производства.  
Не использовать после истечения срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса А по СанПиН 2.1.7.2790. Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируются как бытовые отходы.

Производитель  
ООО «Пуль-Сар», Россия, 141983, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр. 6, помещ. 2, тел:+7(985)491-27-06; электронный адрес: menglet\_ksenia@pul-sar.com

Производственная площадка  
ООО «Пуль-Сар», Россия, 141983, Московская обл., г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр. 6, помещ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, тел: +7(985)491-27-06, электронный адрес: menglet\_ksenia@pul-sar.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан: организация, принимающая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:  
ТОО «NOVA CARE», Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Навои, здание 70, кв 37, почтовый индекс 050043, тел.: 8701 991 11 49, 8 771 581 83 81, e-mail: nova-care@mail.ru, mariyash@inbox.ru

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения  
Нормативный Документ завода-производителя

Данные о выпуске инструкции по медицинскому применению  
XX.XX.XXXX

Символы и обозначения, использованные при маркировке.

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Изготовитель                                   |
|  | Не использовать при повреждении упаковки       |
|  | Стерильная жидкость внутри, стерилизация паром |
|  | Хрупкое, обращаться осторожно                  |
|  | Не допускать воздействия солнечного света      |
|  | Беречь от влаги                                |
|  | Температурный диапазон                         |
|  | Запрет на повторное применение                 |
|  | Обратитесь к инструкции по применению          |

Решение: N062471  
Дата решения: 14.04.2023  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Кашкымбаева Л. Р.  
(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан)  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе


Black

ЛИЦО Times New Roman 6 pt

|                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Заказ №: <input type="text"/> |                 | Инновационно-производственная фирма «МГК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Штамп № <input type="text"/>  | Размер: 260*300 | <b>КРАСОЧНОСТЬ</b><br><div><div><input type="checkbox"/> CYAN</div><div><input type="checkbox"/> MAGENTA</div><div><input type="checkbox"/> YELLOW</div><div><input checked="" type="checkbox"/> BLACK</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> SILVER</div><div><input type="checkbox"/> BRONZE</div><div><input type="checkbox"/> GOLD</div><div><input type="checkbox"/> WHITE</div></div> |  |

|                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Заказ №:                                  |                                                                       | Инновационно-производственная фирма «МГК»                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Штамп №                                   |                                                                       | Размер:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260*300 |
| Тип бумаги:                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Название заказа:                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Название папки:                           | Pulsar                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Название файла:                           | Gemoblock_260x300_Maket_tab.ai                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Дизайнер-верстальщик:                     | Биржаков Константин                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Вид печати :                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Офсет | <input type="checkbox"/> Цвет по предоставленному файлу               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <input type="checkbox"/> Флексо           | <input type="checkbox"/> Цвет по образцу заказчика                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <input type="checkbox"/> Высокая          | <input type="checkbox"/> Цветопроба                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                           | <input type="checkbox"/> Цвет по пантонному вееру<br>Solid to process |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                           |                                                                       | КРАСОЧНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CYAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SILVER                                                                                                                                                                                               |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BRONZE                                                                                                                                                                                            |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> YELLOW <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GOLD                                                                                                                                                                                               |         |
|                                           |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BLACK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> WHITE                                                                                                                                                                         |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ТРАФАРЕТ                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ЛАК СПЛОШНОЙ                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                           |                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ЛАК ВЫБОРОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                           |                                                                       | Согласовано и утверждено:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                           |                                                                       | Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                           |                                                                       | Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                           |                                                                       | Менеджер: Углова Анна                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                           |                                                                       | 19-06-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                           |                                                                       | Заказчик:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                           |                                                                       | Примечания: <input type="checkbox"/> Ламинация <input type="checkbox"/> Биговка <input type="checkbox"/> Перфорация <input type="checkbox"/> Нумерация <input type="checkbox"/> Тиснение                                                                                                                      |         |
|                                           |                                                                       | Фальцовка до 130*60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                           |                                                                       | Times New Roman 6 pt                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                           |                                                                       | Данная распечатка не является цветопробой.                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                           |                                                                       | Внимание! Подпись клиента под данным оригинал-макетом говорит о том, что клиент согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения клиентом оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в отпечатанном тираже. |         |

Схема фальцовки

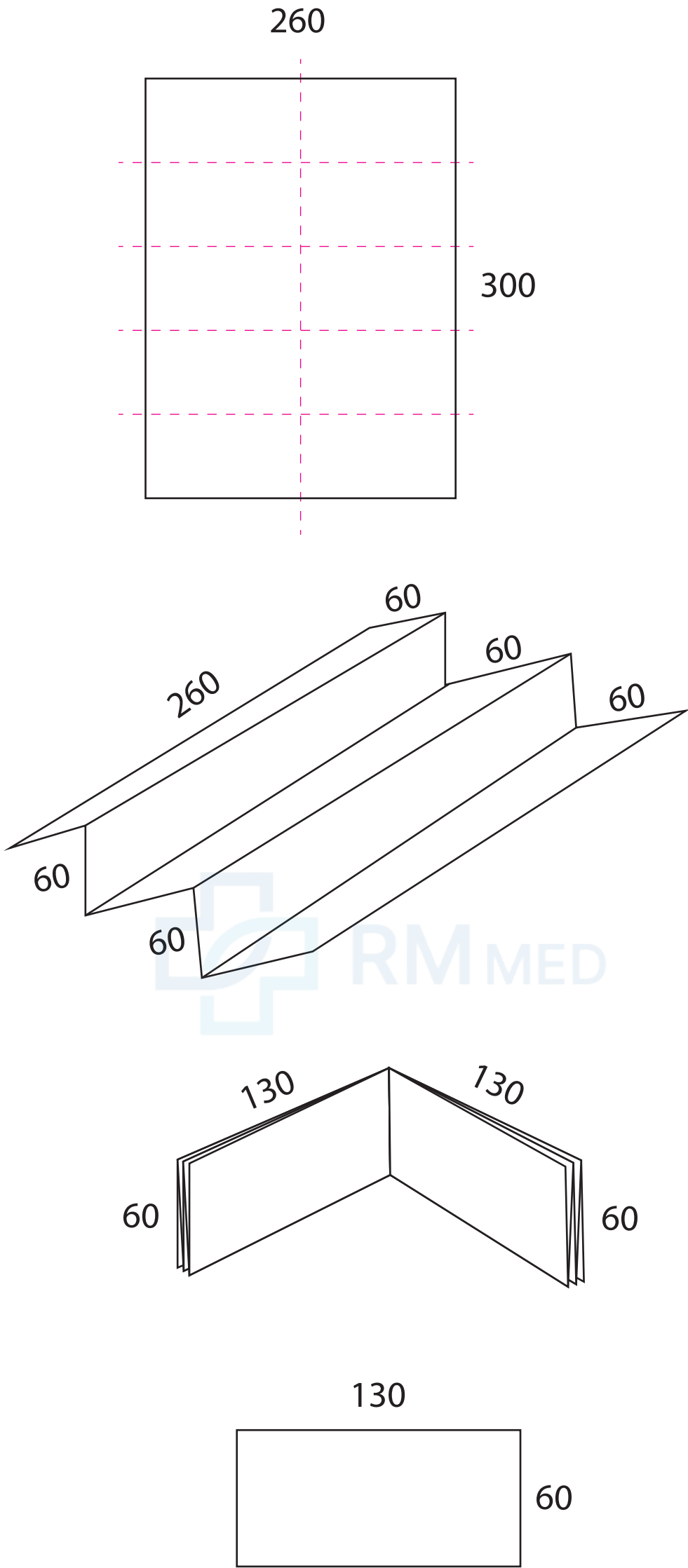

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Заказ №:                                                                                                                                                                                                                        |  | Инновационно-производственная фирма «МГК» |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |           |      |
| Штамп №                                                                                                                                                                                                                         |  | Размер:                                   | 260*300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Согласовано и утверждено:                                                                                                    | Подпись   | Дата |
| Тип бумаги:                                                                                                                                                                                                                     |  |                                           |         | КРАСОЧНОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Менеджер: Углова Анна 19-06-2023                                                                                             |           |      |
| Название заказа:                                                                                                                                                                                                                |  |                                           |         | <input type="checkbox"/> CYAN <input type="checkbox"/> MAGENTA <input type="checkbox"/> YELLOW <input checked="" type="checkbox"/> BLACK                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SILVER <input type="checkbox"/> BRONZE <input type="checkbox"/> GOLD <input type="checkbox"/> WHITE | Заказчик: |      |
| Название папки: Pulsar                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |         | Примечания: <input type="checkbox"/> Ламинация <input type="checkbox"/> Биговка <input type="checkbox"/> Перфорация <input type="checkbox"/> Нумерация <input type="checkbox"/> Тиснение                                                                                                                      |                                                                                                                              |           |      |
| Название файла: Lymphoblock_260x300_Maket_tab.ai                                                                                                                                                                                |  |                                           |         | Фальцовка до 130*60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |           |      |
| Дизайнер-верстальщик: Биржаков Константин                                                                                                                                                                                       |  |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |           |      |
| Вид печати : <input type="checkbox"/> Цвет по предоставленному файлу <input type="checkbox"/> Цвет по образцу заказчика <input type="checkbox"/> Цветопроба <input type="checkbox"/> Цвет по пантионному вееру Solid to process |  |                                           |         | Внимание! Подпись клиента под данным оригинал-макетом говорит о том, что клиент согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения клиентом оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в отпечатанном тираже. |                                                                                                                              |           |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Офсет <input type="checkbox"/> Флексо <input type="checkbox"/> Высокая                                                                                                                      |  |                                           |         | Данная распечатка не является цветопробой.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |         | <input type="checkbox"/> ТРАФАРЕТ <input type="checkbox"/> ЛАК СПЛОШНОЙ <input type="checkbox"/> ЛАК ВЫБОРОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |           |      |